




# ICU 動物用加護病房 使用指南

www.benepet.com

益寵生醫股份有限公司



LCD觸控螢幕 外接儀器插座 電源開關

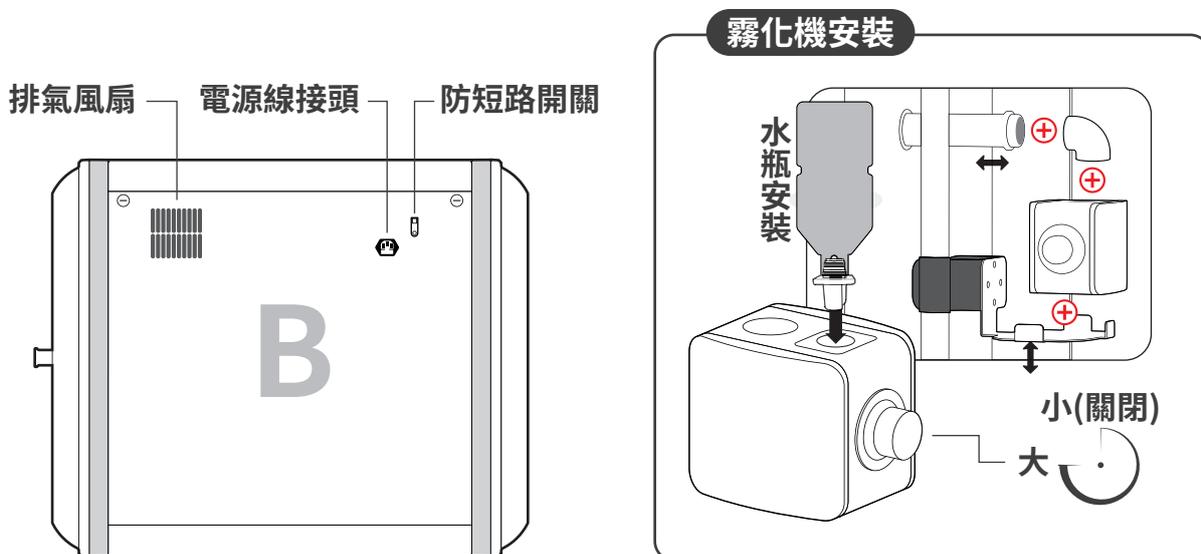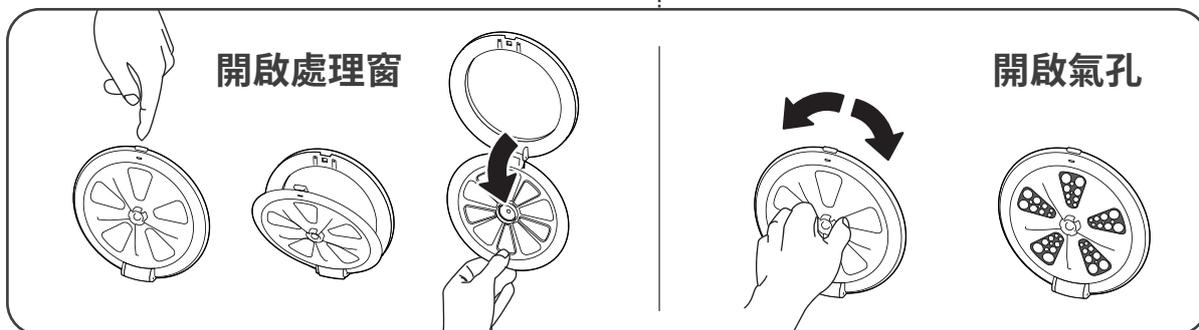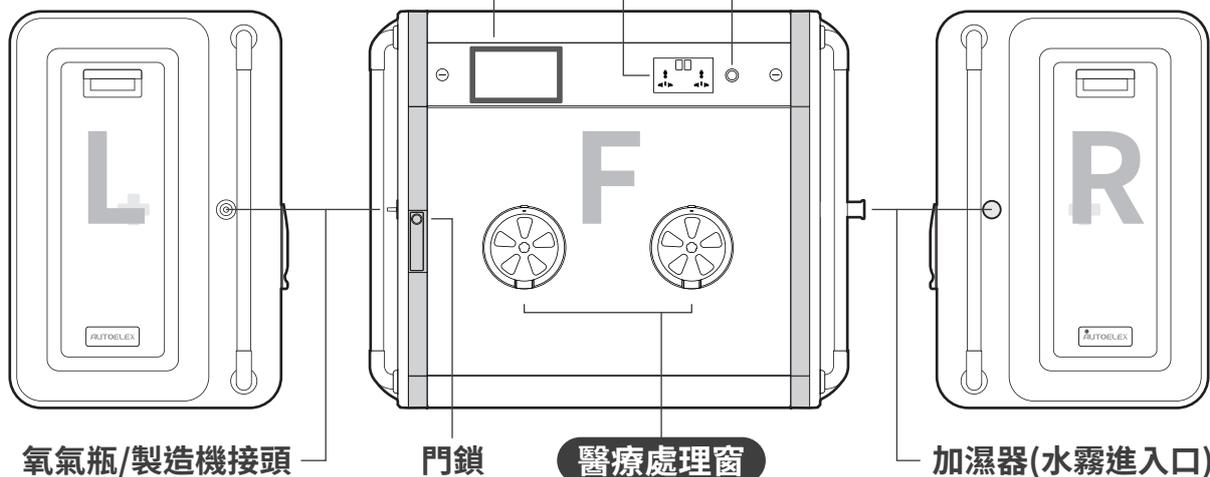

本產品僅供動物使用，非人類使用



加濕機套組




氧氣調節組

## 主頁面

- ||| 灰色:無動作
- ||| 藍色:降溫中
- ||| 紅色:加熱中

要更改溫度、濕度、二氧化碳或氧氣的設定值，直接觸控對應欄位即可。

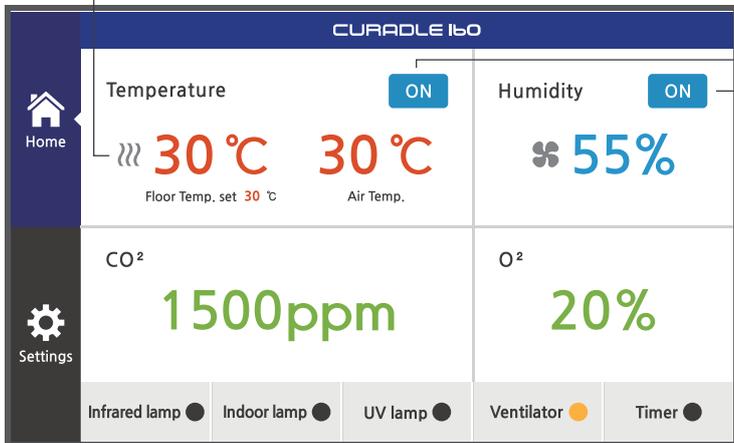

加熱冷卻板開關


加濕器開關  
需接電並開啟加濕器才能運作

二氧化碳或濕度高於標準值時，會強制排氣

- 紅外線燈    室內燈    紫外線燈    風扇    定時器
- 黑色關閉    ● 黃色開啟

- 橘色:溫度
- 藍色:濕度
- 綠色:氣體(氧氣、二氧化碳)

## 設定頁面

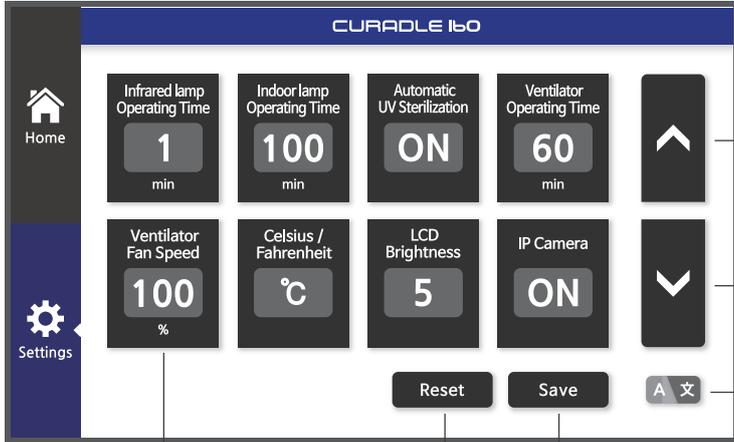

增加 / 向上選擇項目

減少 / 向下選擇項目

語言切換

回復原廠設定

風速:降低風速可減少噪音

儲存目前設定:需要儲存後設定值才會生效